



GEBRUIKSAANWIJZING

Prone Head System Plus


Zur Verwendung mit der Kopfschale Prone Face Plus, um das Gesicht des Patienten in Bauchlage optimal zu unterstützen. Voor gebruik met het Prone Face Plus kussen voor optimale ondersteuning van het gezicht van de patiënt in buikligging.

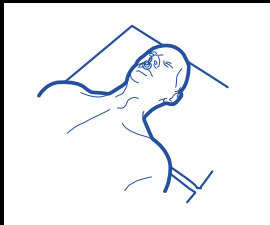


1 Tubus in Rückenlage diskonnnectieren.
Koppel de intubatie slang los in rugligging.

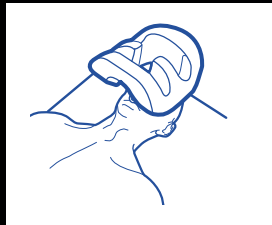


2 Kopfschale auf dem Gesicht des Patienten positionieren.
Plaats het kussen op het gezicht van de patiënt.

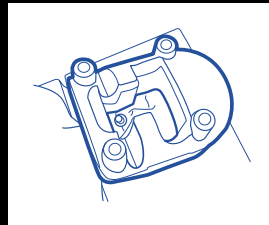


3 Helm auf der Kopfschale platzieren.*
*Plaats de helm op het kussen.**

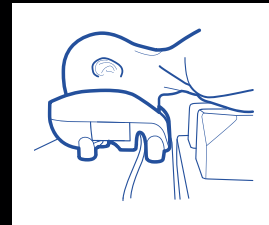

4 Patient in Bauchlage bringen und Tubus konnektieren.
Leg de patiënt in buikligging en sluit de slang weer aan.

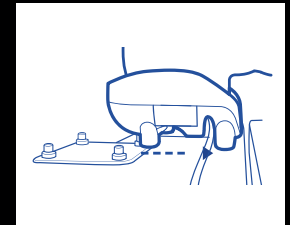


5 Helm anheben, um ihn mit dem Spiegel zu verbinden.
Hef de helm op om vast te maken aan de spiegel.

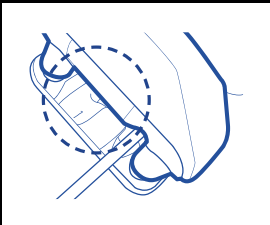

6 Position des Gesichts mithilfe des Spiegels kontrollieren.
Controleer de positie van het gezicht met behulp van de spiegel.



7 Schrauben so einstellen, dass der Nacken in einer neutralen Position ist.
Stel de schroeven zo af dat de hals in een neutrale positie staat.

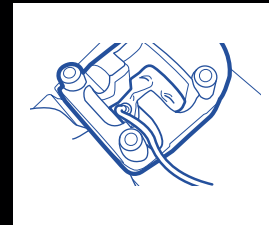

★ Sicherstellen, dass der Tubus frei liegt.
Zorg ervoor dat de slang vrij hangt.

Reinigungshinweis *Reinigingsinstructies*

Waschen Sie den Spiegel ausschließlich mit warmem Seifenwasser oder standardmäßigen Desinfektionstüchern. Das System ist nicht autoklavierbar.

Was de spiegel uitsluitend met warm zeepwater of standaard desinfecterende doekjes. Het systeem is niet autoclaveerbaar.

LOT

92243

 Care Surgical Limited, Unit 6, Ringtail Road, Burscough, L40 8JY, UK

EC REP Care Surgical Supplies Limited, 69 Esker Woods Drive, Lucan, Co Dublin, K78PX45, Ireland

 **NON STERILE**

nicht steril
niet-steriel

 **LATEX**

latex-frei
latexvrij

 **!**

Beilage beachten
Zie bijlage

 **CE**

CE-zertifiziert
CE gecertificeerd

 **MD**

Medizinprodukt
Medisch hulpmiddel

 **2**

wiederverwendbar
herbruikbare

Importeur/Importeur:

nordiska 
helping people care

Victoria Höhe 1
D-51645 Gummersbach
T +49 (0) 2261-9891-0
F +49 (0) 2261-9891-111
info@nordiska.de
www.nordiska.de