


GEBRAUCHSANWEISUNG


Prone Face Soft Größe M

Das Prone Face Soft ist die clevere Einweg-Lösung der Kopflagerung in Bauchlage. Der Endotrachealtubus muss nicht diskonnektiert werden.


Prone Face Soft er en smart engangsløsning til placering af hovedet, når patienten skal ligge på maven. Endotrachealrøret skal ikke fjernes.

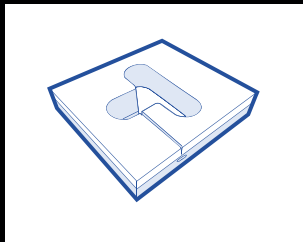


- 1** Entnehmen Sie das Kissen bitte eine Nacht vor dem Eingriff.
Tag venligst puden ud af emballagen natten før, den skal bruges.

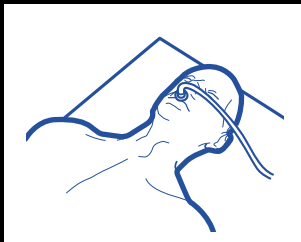


- 2** Legen Sie dem Patienten in Rückenlage das Kissen auf das Gesicht.
Læg puden på patientens ansigt, mens patienten ligger på ryggen.

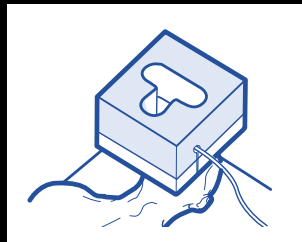

- 3** Führen Sie den Tubus entweder durch den Schlitz, oder durch die Öffnung an der Seite.
Før røret gennem slidsen gennem åbningen i siden.

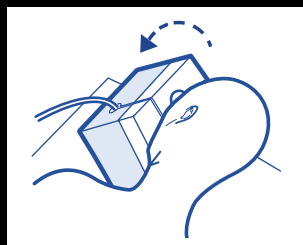

- 4** Bringen Sie den Patienten in Bauchlage.
Vend patienten om på maven.

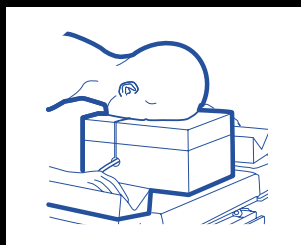

- 5** Anschließend sicherstellen, dass sich der Nacken in einer neutralen Position befindet.
Derefter skal du sikre, at nakken er i en neutral position.

Best.-Nr. 92266



 **Care Surgical Limited**, Unit 6, Ringtail Road, Burscough, L40 8JY, UK

EC REP **Care Surgical Supplies Limited**, 69 Esker Woods Drive, Lucan, Co Dublin, K78PX45, Ireland



latex-frei
latexfri



Einwegartikel
Engangsartikel



Medizinprodukt
Medicinsk udstyr



nicht steril
ikke steril



CE-zertifiziert
CE-certificeret

Importeur/Importer:

nordiska 
helping people care

Victoria Höhe 1
D-51645 Gummersbach

T +49 (0) 2261-9891-0
F +49 (0) 2261-9891-111

info@nordiska.de
www.nordiska.de