


GEBRAUCHSANWEISUNG

Prone Face Soft Größe M




Das Prone Face Soft ist die clevere Einweg-Lösung der Kopfpositionierung in Bauchlage. Der Endotrachealtubus muss nicht diskonnektiert werden.

The Prone Face Soft is the smart disposable-solution for head positioning during prone position. The endotracheal tube does not have to be disconnected.

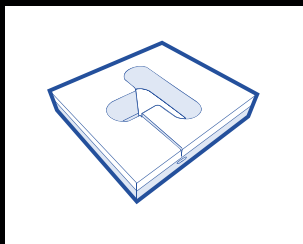


1 Entnehmen Sie das Kissen bitte eine Nacht vor dem Eingriff.

Remove from bag the night before start of procedure.

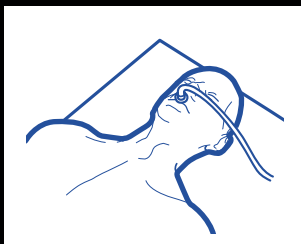


2 Legen Sie dem Patienten in Rückenlage das Kissen auf das Gesicht.

With patient supine, place cushion on their face.

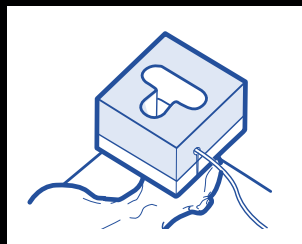


3 Führen Sie den Tubus sowohl durch den Schlitz, als auch durch die Öffnung an der Seite.

Feed the tubing up either slot and through the hole.

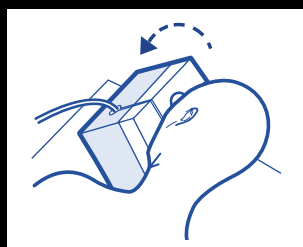

4 Bringen Sie den Patienten in Bauchlage.

Turn patient into prone position.

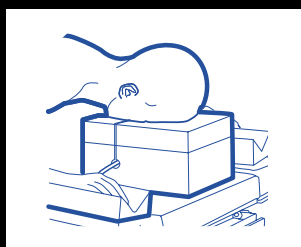

5 Anschließend sicherstellen, dass sich der Nacken in einer neutralen Position befindet.

Once turned, ensure neutral neck line.

Best.-Nr. 92266



Care Surgical Limited, Unit 6, Ringtail Road, Burscough, L40 8JY, UK

EC REP Care Surgical Supplies Limited, 69 Esker Woods Drive, Lucan, Co Dublin, K78PX45, Ireland



latex-frei
latex-free



Einwegartikel
single use only



Medizinprodukt
Medical device



nicht steril
non sterile



CE-zertifiziert
CE-certified

Importeur/Importer:

nordiska 
helping people care

Victoria Höhe 1
D-51645 Gummersbach
T +49 (0) 2261-9891-0
F +49 (0) 2261-9891-111

info@nordiska.de
www.nordiska.de