


GEBRAUCHSANWEISUNG

Prone Face Soft Größe M

Das Prone Face Soft ist die clevere Einweg-Lösung der Kopflagerung in Bauchlage. Der Endotrachealtubus muss nicht diskonnektiert werden.


Prone Face Soft er en smart engangsløsning til støtte av hodet i mageleie.

Endotrachealtuben må ikke fjernes.

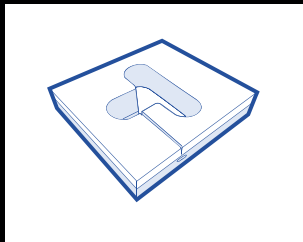


1 Entnehmen Sie das Kissen bitte eine Nacht vor dem Eingriff.

Fjern puten én natt før inngrepet.

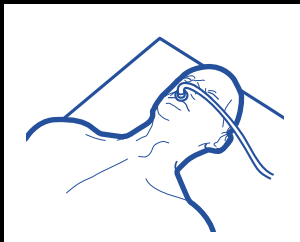


2 Legen Sie dem Patienten in Rückenlage das Kissen auf das Gesicht.

Legg puten på ansiktet til pasienten som ligger på ryggen.

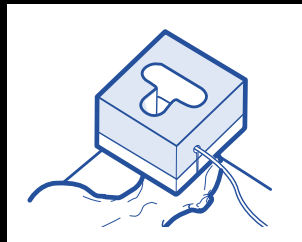


3 Führen Sie den Tubus sowohl durch den Schlitz, als auch durch die Öffnung an der Seite.

Sett inn tuben gjennom sprekken åpningen på siden.

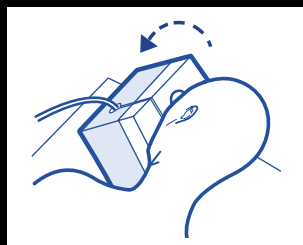

4 Bringen Sie den Patienten in Bauchlage.

Legg pasienten i mageleie.

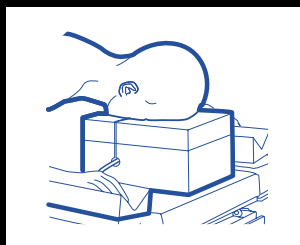

5 Anschließend sicherstellen, dass sich der Nacken in einer neutralen Position befindet.

Forsikre deg så om at nakken befinner seg i en nøytral stilling.

Best.-Nr. 92266



 **Care Surgical Limited**, Unit 6, Ringtail Road, Burscough, L40 8JY, UK

EC REP **Care Surgical Supplies Limited**, 69 Esker Woods Drive, Lucan, Co Dublin, K78PX45, Ireland



latex-frei
lateksfri



Einwegartikel
Produkt til
engangsbruk



Medizinprodukt
Medisinsk enhet



nicht steril
ikke steril



CE-zertifiziert
CE-sertifisert

Importeur/Importer:

nordiska 
helping people care

Victoria Höhe 1
D-51645 Gummersbach
T +49 (0) 2261-9891-0
F +49 (0) 2261-9891-111

info@nordiska.de
www.nordiska.de