


GEBRAUCHSANWEISUNG


Prone Face Soft Größe M

Das Prone Face Soft ist die clevere Einweg-Lösung der Kopflagerung in Bauchlage. Der Endotrachealtubus muss nicht diskonnektiert werden.


Prone Face Soft är den smarta engångslösningen för att hålla huvudet i rätt läge när patienten ligger på mage. Endotrakealtuben får inte kopplas bort.

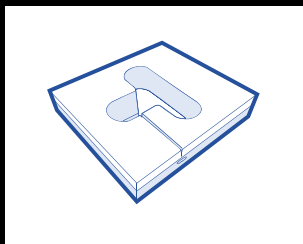


1 Entnehmen Sie das Kissen bitte eine Nacht vor dem Eingriff.
Ta bort kudden en natt före ingreppet.

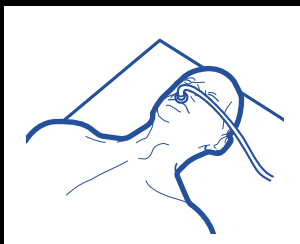


2 Legen Sie dem Patienten in Rückenlage das Kissen auf das Gesicht.
Lägg kudden på ansiktet med patienten i ryggläge.

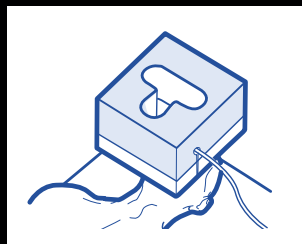

3 Führen Sie den Tubus sowohl durch den Schlitz, als auch durch die Öffnung an der Seite.
Dra tuben genom skåran genom öppningen på sidan.

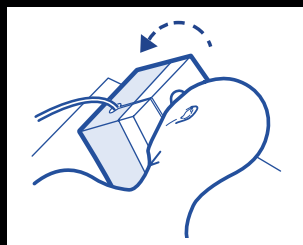

4 Bringen Sie den Patienten in Bauchlage.
Lägg patienten på mage.

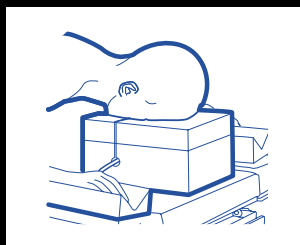

5 Anschließend sicherstellen, dass sich der Nacken in einer neutralen Position befindet.
Säkerställ sedan att nacken är i neutral position.

Best.-Nr. 92266



 **Care Surgical Limited**, Unit 6, Ringtail Road, Burscough, L40 8JY, UK

EC REP **Care Surgical Supplies Limited**, 69 Esker Woods Drive, Lucan, Co Dublin, K78PX45, Ireland



latex-frei
latex-fri



Einwegartikel
Engångsartikel



Medizinprodukt
Medicinteknisk
utrustning



nicht steril
inte steril



CE-zertifiziert
CE-certifierad

Importeur/Importör:

nordiska 
helping people care

Victoria Höhe 1
D-51645 Gummersbach

T +49 (0) 2261-9891-0
F +49 (0) 2261-9891-111

info@nordiska.de
www.nordiska.de