


GEBRAUCHSANWEISUNG


Prone Head System Plus

Zur Verwendung mit der Kopfschale Prone Face Plus, um das Gesicht des Patienten in Bauchlage optimal zu unterstützen.


For use with Prone Face Plus cushion to optimally support the patient in prone position.

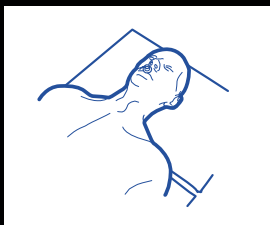


1 Tubus in Rückenlage diskonn-
nectieren.
*With patient supine, discon-
nect ET tubing.*

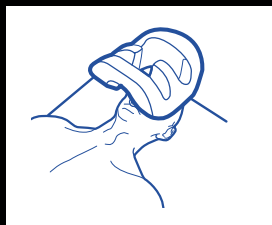


2 Kopfschale auf dem Gesicht
des Patienten positionieren.
*Place cushion onto patient's
face.*

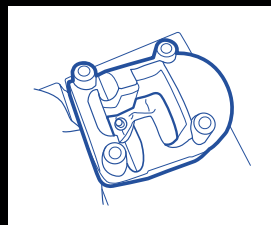


3 Helm auf der Kopfschale
platzieren.*
*Place helmet over cushion.**

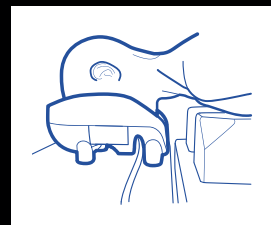

4 Patient in Bauchlage bringen
und Tubus konnektieren.
*Turn patient into prone po-
sition and reconnect ET
tubing.*

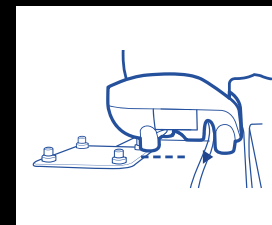

5 Helm anheben, um ihn mit
dem Spiegel zu verbinden.
*Lift helmet and locate
onto mirror's cogs.*

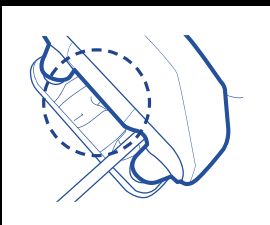

6 Position des Gesichts mithilfe
des Spiegels kontrollieren.
*Check face is correctly
positioned in cushion.*



7 Schrauben so einstellen, dass
der Nacken in einer neutralen
Position ist.
*Adjust cogs to obtain neutral
neck line.*



★ Sicherstellen, dass der Tubus
frei liegt.
*Ensure tubing is not trapped
between the cushion and
patient's face.*

Reinigungshinweis Cleaning instructions

Waschen Sie den Spiegel ausschließlich mit warmem
Seifenwasser oder standardmäßigen Desinfektions-
tüchern. Das System ist nicht autoklavierbar.

*Clean with warm soapy water or standart hospital
wipes. Do not autoclave.*



92243



Care Surgical Limited, Unit 6, Ringtail
Road, Burscough, L40 8JY, UK

EC REP Care Surgical Supplies Limited,
Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin K78
X5P8 Ireland



nicht steril
non sterile



latex-frei
latex-free



Beilage beachten
note attachment



CE-zertifiziert
CE-certified



Medizinprodukt
Medical device



wiederverwendbar
reusable

Importeur/Importer:

nordiska 
helping people care

Victoria Höhe 1
D-51645 Gummersbach
T +49 (0) 2261-9891-0
F +49 (0) 2261-9891-111
info@nordiska.de
www.nordiska.de