


REINIGUNGSANLEITUNG

STIRNLEUCHE WL250

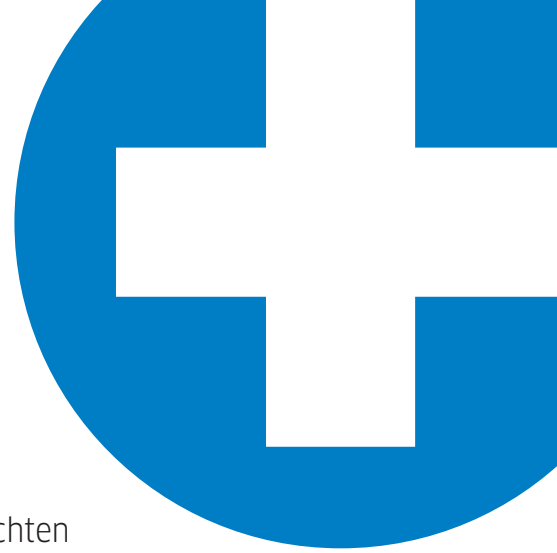

WICHTIGER HINWEIS

Um alle Gefahren zu vermeiden, wischen Sie lieber mit einem feuchten Tuch statt die Stirnlampe unter fließendes Wasser zu halten. Fließendes Wasser oder ein zu nasses Tuch können dafür sorgen, dass das Wasser Schäden an den Akkus, den Schaltkreisen oder den Linsen verursacht.

REINIGUNG DER LINSEN

Reinigen Sie die Linsen im Bedarfsfall mit einem Mikrofasertuch befeuchtet mit Reiniger für optische Linsen.

REINIGUNG DER STIRNLAMPE

Reinigen Sie die Stirnlampe mit einem leicht befeuchteten Tuch zur Oberflächenreinigung. Nutzen Sie eine dieser Möglichkeiten und stellen Sie sicher, dass Sie das Tuch vor der Nutzung auswringen:

- Cavicide Tücher
- 10% Bleichlösung auf dem Tuch
- 70% Isopropanol-Alkohol-Lösung auf dem Tuch
- Milde Seife und Wasser auf dem Tuch

